

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>


## NÁVOD NA POUŽITIE PODO LINE FRÉZKA



Predajca:  
Renáta Harenčáková-LACHERS  
[www.zariadeniedosalonu.sk](http://www.zariadeniedosalonu.sk)



## PREHĽAD PANEĽA A ZARIADENIA

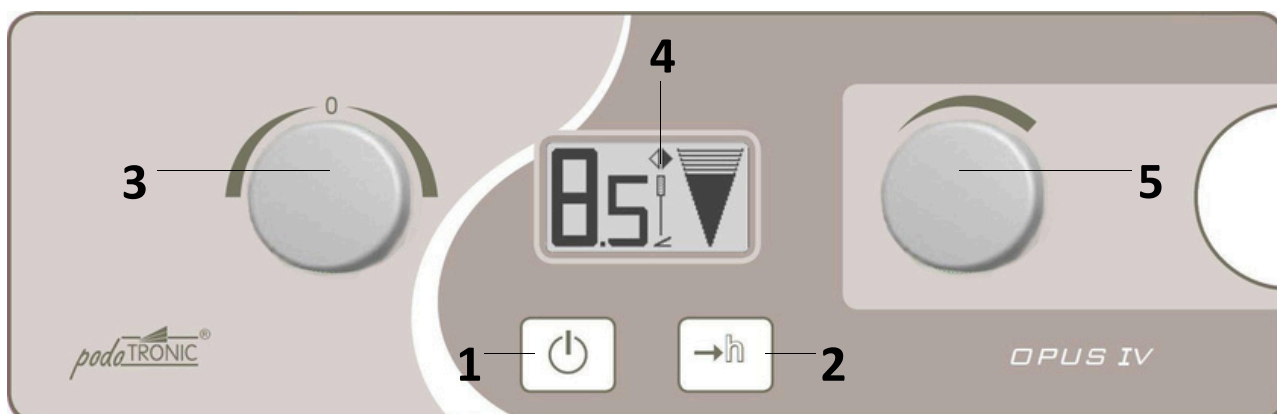

- 1 HLAVNÝ VYPÍNAČ  
(ZAPNUTIE/VYPNUTIE)
- 2 TLAČIDLO NA OVLÁDANIE  
POČÍTAČOVÝCH SMERÍ
- 3 OTOČNÝ GOMBÍK PRERÝCHLOSŤ / SMER  
ROTÁCIA
- 4 DISPLEJ
- 5 NASTAVENIE SÁCIEHO V KONDŮ
- 6 SÁCIA HADICA  
(ÚZKO SPOJENÁ S FILTRAČNOU KOMOROU)

- 7 ODNÍMATEĽNÝ KRYT FILTRAČNEJ KOMORY /  
KRYTOBSAHUJÚCI KONTAKTY HLAVY
- 8 HADICA
- 9 HLAVA S MIKROSPÍNAČOM
- ZADNÁ ČASŤ JEDNOTKY
- 10 PRIPOJOVACIA ZÁSUVKA PRE  
NOŽNÝ PEDÁL
- 11 POISTKA



## OBSAH

<b>I. PRED POUŽITÍM</b>		
1. MONTÁŽ FILTRA A NASÁVACEJ HLAVY .....		5
2. ZAPNUTIE .....		5
<b>II. FUNKCIE</b>		
1. NASTAVENIE RÝCHLOSTI A SMERU.....		6
2. NASTAVENIE SACIEHO VÝKONU.....	4. VÝMENA PRSTA.....	6
3. OCHRANA PROTI PREHRIATIU SACIEJ HLAVY.....		7
		7
5. OCHRANA PROTI PREHRIATIU SACIEHO TURBÍNY.....		8
6. MERAČ PREVÁDZKOVÝCH HODÍN.....		9
<b>III. PRIPOJENIE NOŽNÉHO/PEDÁLOVÉHO SPÍNAČA</b>	<b>S.</b>	<b>11</b>
<b>IV. ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ</b>	<b>S.</b>	<b>1</b>
1. ČISTENIE NASÁVACEJ TURBÍNY .....	<b>S.</b>	<b>2</b>
2. ČISTENIE VRETENA .....	<b>S.</b>	<b>1</b>
3. VÝMENA FRÉZY .....	<b>S.</b>	<b>2</b>
4. BEZPEČNOSŤ .....	<b>S.</b>	<b>1</b>
		<b>3</b>
<b>V. ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY</b>	<b>S.</b>	<b>14</b>
		<b>3</b>
<b>VI. PODMIENKY PREPRAVY A SKLADOVANIA</b>	<b>S.</b>	<b>15</b>
		<b>4</b>
<b>VII. TECHNICKÉ ÚDAJE</b>	<b>S.</b>	<b>15</b>
<b>VIII. OBSAH BALENIA</b>	<b>S.</b>	<b>16</b>

## II. PRED POUŽITÍM

Ďakujeme, že ste si vybrali a zakúpili frézu SYIS PODO LINE. Tento prístroj bol navrhnutý a vyrobený v súlade so smernicou o zdravotníckych pomôckach 93/42/EHS a nasledujúcimi, aby sa zaručila kvalita a bezpečnosť. Prístroj je určený na používanie len kvalifikovaným podiatrom a manikérom na podologické a manikúrové ošetrenia. Prístroj sa nesmie používať na iné účely ako na podiatriu/manikúru. Všetky poskytnuté záruky voči osobám a škodám na majetku pri použití na iné ako vyššie uvedené účely prestávajú platiť.

1 Pozorne si prečítajte návod na použitie a uschovajte si ho na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

2 Uistite sa, že spotrebič nebol počas prepravy poškodený.

3 Uchovajte obal - potrebný pre prípadné budúce opravy. Spotrebič

nepoužívajte:

- Ak je poškodený elektrický kábel alebo zástrčka
- Ak je spotrebič poškodený alebo spadol-
- Bez správne nasadeného čistého filtračného vrečka

4 Pred použitím zariadenia sa uistite, že napätie na riadiacej jednotke je pripojené k sieti (230 V / 50 Hz alebo 115 V / 60 Hz).

5 Spotrebič namontujte na rovný a stabilný povrch. Uistite sa, že vývod spalín v zadnej časti riadiacej jednotky nie je zablokovaný a že v zadnej časti zariadenia je dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu a spalín. Spotrebič umiestnite na čisté a suché miesto. Spotrebič neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla alebo čistenia parou.

6 Zabráňte náhlým zmenám teploty spôsobeným kondenzáciou vody na spotrebiči. Počkajte, kým spotrebič dosiahne teplotu okolia. prevádzková teplota je v rozmedzí od 15 °C do + 40 °C.

## **I. PRÍPRAVA**

- 1 MONTÁŽ VRECKOVÉHO FILTRA A PRIPOJENIE ODSÁVACEJ HLAVICE**  
**2 PRIPOJENIE NAPÁJANIA A ZAPNUTIE**

### **1. MONTÁŽ FILTRA A PRIPOJENIE SACEJ HLAVICE**

Sacia rúrka je ⑧ pevne spojená s krytom filtračnej komory ⑦. Kryt obsahuje napájacie kontakty pre rukoväť. Vedzte kryt ⑦ do priestoru filtra. Uistite sa, že elektrické kontakty v spodnej časti sú správne pripojené. To sa dá jednoducho pripojiť bez použitia nadmernej sily.

Vyberte hlavicu ⑨ z ochranného vrečka a vložte ju do držiaka v prednej časti spotrebiča.

### **2. PRIPOJENIE NAPÁJANIA A ZAPNUTIE SPOTREBIČA**

Uistite sa, že sieťový kábel je pevne nainštalovaný a vybavený plochou euro zástrčkou. Zástrčku zasuňte do vhodnej elektrickej zásuvky.

Spotrebič zapnite stlačením tlačidla ①.

Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí logo SYIS PODO LINE ④ a

potom sa na displeji približne na 3 sekundy zobrazí zostávajúci počet prevádzkových hodín:



Potom sa na displeji zobrazí ④ na "štandardnú indikáciu":



Po opätovnom spustení stroja sa načítajú naposledy zvolené nastavenia, ktoré sa zobrazia na displeji (napr. smer otáčania, rýchlosť, sací výkon atď.).

Teraz môžete nastavenia upraviť a vložiť požadovanú frézu.

## II. FUNKCIE

- 1 NASTAVENIE OTÁČOK A SMERU OTÁČANIA
- 2 NASTAVENIE SACIEHO VÝKONU
- 3 OCHRANA HLAVY PROTI PREŽAŽENIU
- 4 VÝMENA FILTRA
- 5 OCHRANA PROTI TEPLOTE SANIA
- 6 MERAČ PREVÁDZKOVÝCH HODÍN

### 1. NASTAVENIE OTÁČOK A SMERU OTÁČANIA

Otáčky a smer môžete zvoliť otáčaním gombíka ③ dopredu na displeji označený šípkou (▶ = doprava; ◀ = doľava).

Dve veľké číslice na displeji ukazujú počet otáčok v tisícoch otáčok za minútu.

Ak chcete nastaviť rýchlosť 15000, volič by mal byť nastavený na hodnotu uvedenú na displeji.



### 2. NASTAVENIE SACIEHO VÝKONU


Otočte otočný ovládač ⑤ na požadované množstvo odsávania. Životnosť motora odsávania môžete predĺžiť nastavením voliča do strednej (úspornej) polohy.

Otočením otočného ovládača ⑤ do polohy "0" sa motor odsávania vypne. Výkon odsávania je

na displeji indikovaný lievikovitou čiarovou grafikou:



malý  
nasávanie

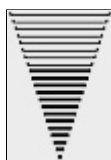

stredná  
sanie



veľký  
príjem

### **3. OCHRANA PROTI PREHRIATIU HLAVY**

Ak je motor zablokovaný alebo preťažený, elektronická ochrana proti preťaženiu preruší napájanie a sacia hlava a nasávací turbína sa zastavia.

Ozve sa akustický signál; na displeji sa zobrazí blikajúce chybové hlásenie " HEAD OVERHEAT".



Prístroj sa musí znovu aktivovať nastavením gombíka regulácie otáčok ③ späť do strednej polohy (nula "0").

### **3. VÝMENA FILTRA**

#### **VČASNÁ VÝMENA FILTRA PREDLŽUJE ŽIVOTNOSŤ NASÁVACEJ TURBÍNY**

Výmena by sa mala uskutočniť, keď je badateľný pokles sacieho výkonu; najneskôr vtedy, keď je filter naplnený do 2/3.

Pri prevádzke s naplneným filtrom bude turbína dostávať menej vzduchu, a preto sa zvýši prevádzková teplota.

To môže spôsobiť poškodenie nasávacej turbíny. V tomto prípade neplatia všetky záruky na poškodenie!

Filtračné vrečko je na jedno použitie, preto nikdy nevyprázdňujte naplnené vrečko. Nie je to hygienické a dôjde k perforácii filtra. Vnútro komory udržiavajte vždy čisté. Zabráňte tak tomu, aby sa do motora odsávača dostali nečistoty.

Prípojka ⑥ sacieho potrubia je pevne pripojená ku krytu ⑦. Ak chcete odstrániť celý kryt filtračného priestoru ⑦, opatrne vytiahnite časť prípojky saciej rúrky ⑥. Potom pridržte filter dlaňou v prednej časti, aby ste zabránili vniknutiu prachu, a vytiahnite golier hadice z otvoru. Vyberte celý filter a vymeňte ho za nový. Vymeňte a znovu zložte - v opačnom poradí.

**TIP:**

**ŠTANDARDNÉ - VOŇAVÉ KAZETY, AKO SÚ KAZETY DO DOMÁCICH VYSÁVAČOV, SA ZMES FILTRAČNÉHO VRECKA A DO ZNAČNEJ MIERY ZABRÁNIA NEPRÍJEMNÉMU ZÁPACHU.**

**5. OCHRANA TEPLoty NASÁVACEJ TURBÍNY**

Ak teplota vzduchu v sacejturbíne prekročí 80° C, turbína a protihluková násada sa vypnú.

Na displeji sa zobrazí hlásenie "TURBÍNA PREHORIEVA":



Prístroj je možné opätovne aktivovať po poklese teploty v kryte nasávacej turbíny o cca 10 - až 15 °C nastavením gombíka regulácie otáčok ③ späť do stredu ("0").

**DÔLEŽITÉ:**

**MOŽNÉ PRÍČINY PREHORIEVANIA SACEJ TURBÍNY:**

- Zablokovanie sania alebo rukoväte sacej hadice  
(pozri kapitolu V, bod 1 "Čistenie rukoväte sacej hadice", strana 11)

-Preplnený vreckový filter  
(pozri kapitolu III, bod 4 "Výmena filtra", strana 8)

-Nedostatočný prietok vzduchu zo zadnej časti prístroja  
(pozri kapitolu I, bod 5 - 6, strana 4)

Ak sú vyššie uvedené možné príčiny vylúčené, odporúčame vám obrátiť sa na autorizovaného predajcu.

## 6. MERAČ PREVÁDZKOVÝCH HODÍN

### VČASNÁ VÝMENA FILTRA PREDLŽUJE ŽIVOTNOSŤ NASÁVACEJ TURBÍNY

Výmena by sa mala uskutočniť, keď je badateľný pokles sacieho výkonu; najneskôr vtedy, keď je filter naplnený do 2/3.


Pri prevádzke s naplneným filtrom bude turbína dostávať menej vzduchu, a preto sa zvýši prevádzková teplota.

To môže spôsobiť poškodenie nasávacej turbíny. V tomto prípade neplatia všetky záruky na poškodenie!

Filtračné vrečko je na jedno použitie, preto nikdy nevyprázdňujte naplnené vrečko. Nie je a spôsobí perforáciu filtra. Vnútro komory udržiavajte vždy čisté.


Frézka SYIS PODO LINE je vybavená počítadlom prevádzkových hodín, ktoré slúži ako pomôcka a návod na kontrolu a výmenu filtra.

Softvér je naprogramovaný tak, aby vás informoval o výmene filtra po 20 hodinách prevádzky.

Týchto 20 hodín sa bude odpočítavať počas prevádzky stroja. Stlačením tlačidla  ② sa na displeji zobrazia zostávajúce hodiny.



Po dosiahnutí plného počtu 20 hodín budete upozornení zvukovým signálom "pípnutie" a na displeji sa zobrazia nasledujúca správa:

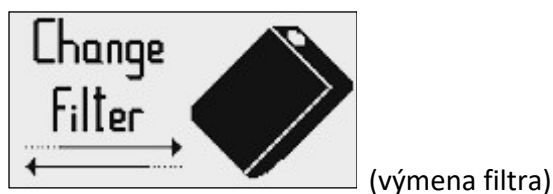

Po zaznení zvukového signálu a správy "Change filter" (Vymeniť filter) musíte nastaviť gombík regulácie otáčok ③, aby ste sa vrátili na štandardný displej.



Ak spotrebič reštartujete hlavným tlačidlom  ①, na displeji sa zobrazí hlásenie "Vymeniť filter" ④ budete počuť zvukový interval, ktorý vám pripomenie výmenu filtra.

Pri nastavovaní rýchlosti na gombíku ③ budete počuť zvuk "pípnutia" a nedôjde k vynulovaniu počítadla hodín prístroja.

### **POZNÁMKA:**

#### **POVÝMENE FILTRA JE POTREBNÉ "RESET" POČÍTADLA PREVÁDZKOVÉHO ČASU.**

Resetovanie počítadla sa nastavuje nasledovne:

Stlačte tlačidlo 4 sekundy, aby sa počítadlo prevádzkových hodín vynulovalo na 20 hodín. Nastaví sa opätovné odpočítavanie 20 hodín, aby sa zabezpečila včasná výmena filtra.


#### **DÔLEŽITÉ !**

Upozorňujeme, že ide len o orientačnú pomôcku a ukazovateľ nekontroluje ani nezobrazuje stav filtra - meria len počet hodín po vynulovaní.

Uistite sa, že ste nielen vynulovali počítadlo, ale aj vymenili vreckový filter.

### **III. PRIPOJENIE NOŽNÉHO SPÍNAČA A PEDÁLU**

Ako príslušenstvo je k dispozícii nožný spínač (ON / OFF)/ pedál. Možno ich pripojiť do zásuvky na zadnej strane prístroja ⑩.

Po pripojení sa na displeji zobrazí symbol .



Pomocou nožného spínača (ON / OFF) možno zariadenie aktivovať podľa nastavenia hodnôt rýchlosti a postreku. Odstránením nožného spínača z hlavy I sa odsávanie zastaví.

Ak je pripojený pedál, pedál regulácie rýchlosti umožní plynulý a veľmi opatrný pohyb na zvolenú maximálnu rýchlosť. Naprogramovaný počet otáčok slúži ako "predvoľba" maximálnej rýchlosti.

Týmto spôsobom je možnosť ovládania nohou obmedzená na počet otáčok zobrazených na displeji, inak definuje maximálnu rýchlosť **30** (= 30 000 ot./min.), aby bolo možné na pedáli zvoliť celý rozsah otáčok

## IV. ÚDRŽBA A OCHRANA

1. ČISTENIE HLAVY
2. POKYNY NA ČISTENIE RUKOVÄTE
3. POUŽÍVANIE NOŽA
4. POISTKA

### 1. ČISTENIE HLAVICE

W zależności od częstości użytkowania, głowicę należy czyścić co najmniej raz w tygodniu.

1. Delikatnie rozdziel głowicę w miejscu styku przyłącza rury ssącej i osłony silnika (zdjęcia 1 - 3).



1



2



3

2. Wyciągnij silnik i uchwyt z osłony silnika, w sposób pokazany poniżej (zdjęcia 4 – 6). Wyczyść wnętrze osłony silnika szczoteczką i złoż głowicę z powrotem. Do czyszczenia wewnętrznej części osłony nie wolno używać żadnych płynów.



4



5



6

3. Podczas składania rączki upewnij się czy silnik dokładnie wpasowa się w rowki w osłonie silnika, jak pokazano poniżej, na zdjęciu 7. Złożenie jest możliwe tylko przy właściwym dopasowaniu ustawienia silnika i nie wymaga użycia siły.



4. Gdy silnik został umieszczony z powrotem w osłonie, dopasuj odpowiednio przyłącze rury ssącej do styków silnika, aby uniknąć ich uszkodzenia (zdjęcia 8 - 9).

Uwaga: Należy pamiętać, że prace konserwacyjne w obrębie rączki należy wykonywać bez użycia siły.

## **2. NÁVOD NAČĚNIE RUKOVÄTE**

Jeśli wewnątrz uchwytu zgromadziły się śmieci, przez co narzędzie robocze nie jest bezpiecznie zamocowane lub nie może być wprowadzone do końca uchwytu, uchwyt należy wyczyścić postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Rączka dostarczana jest ze specjalnym przyrządem, służącym do czyszczenia mechanizmu mocującego.



Przyrząd należy delikatnie wprowadzić do uchwytu, obracając nim palcami zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie ostrożnie wyciągnąć. Czynność tę należy wykonać kilkakrotnie, aż do całkowitego oczyszczenia uchwytu. Metoda ta zapewnia delikatne usunięcie zabrudzeń, które przedostały się do uchwytu, nie powodując jego uszkodzenia.



## **3. VÝMENA NOŽA**

Po výmene noža sa vždy uistite, že je stroj prepnutý do pohotovostného režimu mikropsínačom na hlave ⑦.

Rukoväť je vybavená odstredivým mechanizmom "Quick-Grip". Na otvorenie alebo zablokovanie hlavy nie je potrebné krútenie. Frézu zasuňte až na doraz do rukoväte.

Ak chcete frézu vybrať, jednoducho ju rukou vytiahnite.

### **POUŽÍVAJTE LEN NOŽE S PRIEMEROM**

Nikdy nepoužívajte frézy, ktoré sú mimo stredulebosú poškodené.  
Odporúčame frézy s maximálnym priemerom hlavy  $\varnothing$  6 mm.

Neprekračujte maximálnu rýchlosť odporúčanú výrobcom frézy

Vždy používajte ochranné okuliare, aby ste predišli nehodám.

Pri vyšších rýchlostiach nie sú pohyby motora "hladké" (vibrácie v rukoväti); guľôčkové ložiská alebo grez sa môžu poškodiť.

V prípade pochybností sa vždy riadte otáčkami odporúčanými výrobcom frézy....

## **4. POISTKA**

Poistka sa nachádza na zadnej strane stroja. Ak ju chcete vymeniť, odskrutkujte držiak poistky a pomocou skrutkovača vymeňte poškodenú mikro-poistku za novú: T 2,5 A (115 V verzia: T 5A).

## **IV. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY**

\*Pred čistením spotrebiča alebo výmenou poistky odpojte zástrčku od elektrickej siete. poistky!

\*Po vypnutí spotrebiča sa pred stlačením vypínača ON uistite, že je spotrebič v pohotovostnom režime.



\*Spotrebič by sa mal čistiť mäkkou, vlhkou handričkou. Dbajte na to, aby sa do spotrebiča nedostala voda do krytu spotrebiča. Utrite ho suchou a mäkkou handričkou.

\*Ak sa do spotrebiča dostane tekutina alebo akýkoľvek cudzí predmet, spotrebič okamžite vypnite a odpojte zo zásuvky. Pred obnovením prevádzky spotrebiča sa obráťte na autorizovaného predajcu, ktorý vám poskytne ďalšie informácie a technickú pomoc.

\*Ak používate frézy, ktoré sú vyrobené z nástrojovej ocele (hrdza), používajte dezinfekčné prostriedky, ktoré obsahujú ochranu proti korózii.

\*Všetky požiadavky na pomoc, údržbu alebo servis konzultujte len s autorizovanými predajcami. technické opravy!



## **VI PODMIENKY PREPRAVY A SKLADOVANIA**

Urządzenie można przewozić wyłącznie w oryginalnym opakowaniu dostawcy.

temperatura podczas transportu  
i przechowywania: +5°C - +50°C  
temperatura robocza: +10°C - +40°C  
wilgotność względna: maks. 90% bez kondensacji

Priskladovaní prístroja po použití alebo pri jeho odosielaní do autorizovaného servisu nezabudnite odstrániť všetky použité filtračné vrecká.

## **VII TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE**

Napätie:	230 V / 50 Hz (možnosť 115 V 50/60 Hz)
Napájanie:	max. 350 VA
Hlavica:	max. 50 Watt / 24 V / 30 000 U/min
rozmery:	(B x H x T) 320 x 125 x 220 mm
Rozmery nasávacej hlavy:	L= 118 mm, D= 17-27-31 mm
hmotnosť:	cca 4,0 kg (sada)
Poistka:	T 2,5 A (115V verzia: T 5 A)
Insulation class:	2  Typ B 

## **VIII. OBSAH**

### **BALENIE OBSAHUJE:**

- Jednotka
- Hlava 30 000 U/min

s integrovaným odsávaním

### **VOLITEĽNÉ:**

- nožný spínač
- Pedál

**BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA**

1. Zariadenie je profesionálne zariadenie na použitie v kozmetických salónoch. Obsluha zariadenia len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabraňuje nežiaducim účinkom počas ošetrovania.
2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, na mokrých miestach alebo s mokrymi rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.
4. V nasledujúcich prípadoch okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis spoločnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk: (a) do spotrebiča sa dostala kvapalina, (b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky, (c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, (d) spotrebič bol prevrátený alebo prístroj bol poškodený.
5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Prístroj neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s prístrojom.
7. Do otvoru spotrebiča nič nekladajte. V prípade, že sa do otvoru dostane cudzí predmet do otvoru, odpojte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Neumiestňujte zariadenie na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. V prípade pádu sa môže jednotka poškodiť.
9. Aby sa zaručila predpokladaná životnosť spotrebiča, odporúča sa interval interval jednej minúty pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. W opačnom prípade hrozí, že spotrebič bude nesprávne fungovať jeho poškodenie alebo dokonca vyhorenie.

**UPOZORNENIE: V PRÍPADE, ŽE JE NAPÁJANIE PRERUŠENÉ, JE POTREBNÉ, ABY STE SA VYHLI RIZIKU POŠKODENIA:**

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak akémukoľvek nebezpečenstvu.
2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatkom skúseností a znalosti zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní zariadenia tak, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko pre zdravie alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.

**LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA**

Použitý elektrický spotrebič, príslušenstvo a obaly zlikvidujte v recyklačných strediskách v súlade s ochranou

životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do nádob na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení sa použité elektrické zariadenia musia zbierať oddelene a následne odovzdať na zberných miestach pre použité elektrické a elektronické zariadenia.

Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na recykláciu. Mali by sa preto odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.

### **SKLADOVANIE A PREPRAVA**

Zariadenie by sa malo prepravovať len pri teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C v pôvodnom obale. Zariadenie by sa malo skladovať v dobre vetranom vetranej miestnosti a relatívnej vlhkosti maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.